

BIOCLEN® ソフト/O₂・ハードコンタクトレンズ用
強力タンパク脂肪除去剤

Activa Tablet Mini

アクティバ タブレット

すべてのソフト/O₂・ハードコンタクト
レンズに使用できます。

この説明書は大切に保管してください

- ご使用前に必ずこの使用説明書をよく読み、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
- 使用説明書に記載された使用方法や注意事項を必ず守ってください。
- ご使用中のコンタクトレンズの取り扱いについてはレンズの取扱説明書をよく読み、使用方法等を守ってください。

コンタクトレンズを使用していると、涙に含まれる脂質やタンパク質、老廃物などの汚れがレンズに付着します。アクティバ タブレット Miniは通常ケアに週1回するだけのソフト/O₂・ハードコンタクトレンズ用強力タンパク脂肪除去剤です。頑固で落ちにくいレンズの汚れをしっかりと洗浄し、すっきりクリアな視界を保ちます。

～ 眼障害を起こさないために ～

眼障害を防ぐため、
次の事項を必ず守って
ください。



- すべてのケア終了後のレンズケースは、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。



- 眼科医等の専門家に、正しいケア方法の指導を受けましょう。



- レンズケースは定期的に、必ず新しいものと交換してください。



- レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。



- 目の健康を守るため、3か月に1度は定期検査を受けましょう。

使用方法

- 組み合わせて使用するケア用品のレンズケースを使用してください。
- 煮沸消毒用レンズケースは使用しないでください。
- 消毒と同時に本剤を使用しないでください。
- エーオセプトクリアケア、コンセプトワンステップ等の過酸化水素タイプの消毒液で本剤は使用しないでください。(ご使用の際は、下記使用方法に従ってください。)


レンズケースの前



レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。

ソフトコンタクトレンズの場合

ヨウ素タイプ・過酸化水素タイプをお使いの方

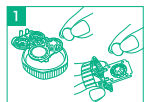

専用レンズケースのホルダーにレンズを入れます。



レンズケースの横または生食塩水またはソフトコンタクトレンズ用すぎ・保存液などを入れ、本剤を1錠入れます。



ふたをしめ、そのまま30分放置してください。



レンズを生食塩水またはソフトコンタクトレンズ用すぎ・保存液などですすいでください。



レンズケースの中の液を捨て、水道水で十分すすいだ後、ペーパータオルなどで水気を拭き取り、普段お使いのケア用品でレンズケアを行ってください。

- 過酸化水素タイプ(エーオセプトクリアケア)などで消毒する場合、特によくすすいでください。すすぎが不十分のままで過酸化水素タイプの消毒剤を使用すると、過剰に発泡することがありますので注意してください。

1本タイプ消毒剤をお使いの方



消毒液でレンズのこすり洗いとすすぎを行ってください。



レンズケースの右(R)および左(L)の横または生食塩水またはソフトコンタクトレンズ用すぎ・保存液などを入れ、本剤を1錠入れます。




ふたをしめ、そのまま30分放置してください。



レンズケースの中の液を捨て、レンズおよびレンズケースを消毒液で十分によくすすいだ後、消毒液で4時間以上ケアを行ってください。

O₂・ハードコンタクトレンズの
使用方法是裏面へ

O2・ハードコンタクトレンズの場合

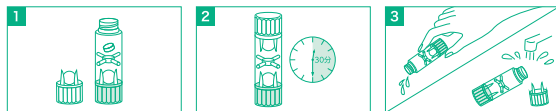

レンズケースにレンズをセットし、水道水または精製水と本剤1錠を入れてください。※左に示したレンズケースの場合は、左右に本剤を1錠ずつ入れてください。

ふたをしめ、そのまま30分放置してください。

レンズケースの中の水を捨て、レンズおよびレンズケースを水道水または精製水で十分すすいでください。

●別途普段お使いのケア用品でレンズケアを行ってください。アクティブタブレットMiniによるケアの前後どちらでも構いません。

△使用上の注意

守らなければならないこと

1. この使用説明書に記載している使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると洗浄が不完全となり、眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
2. コンタクトレンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。
3. すべてのケア終了後のレンズケースは空にして、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。清潔なレンズケースを使用しないと雑菌が繁殖し、眼障害の原因となることもあります。
4. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

してはいけないこと

1. 本剤はコンタクトレンズのタンパク脂肪除去にのみ使用し、本剤または溶解液を飲まないでください。誤って飲んでしまった場合は、多量の水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
2. 溶解液を点眼しないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに多量の水で眼を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
3. 万一、開封時に本剤に変質（吸湿、変色等）、アルミシートの破れなどが認められた場合は、使用しないでください。
4. 溶解液は再使用しないでください。
5. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
6. 煮沸消毒と同時に使用しないでください。
7. 12時間以上同じ溶解液にコンタクトレンズをつけないでください。
8. ハードコンタクトレンズケースは、家庭用洗剤等で洗浄しないでください。変形・変色のおそれがあります。

相談すること

1. 次の人は使用前に眼科医に相談してください。
 - 今までに目のアレルギー症状（たとえば目の充血、かゆみ、はれ、発疹・発赤等）を起こしたことがある人。
 - 眼科医の治療を受けている人。
2. 本剤を使用したコンタクトレンズを装着中、または装着後に、痛み、充血、流涙、目ヤニ、ごろごろ感（または異物感）、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにコンタクトレンズをはずし、眼科医に相談してください。そのまま装着し続けると、眼障害につながることもあります。

保管および取り扱い上の注意

1. 直射日光を避け、小児の手の届かない所に常温保管してください。
2. アルミシートを開封したら、すみやかに使用してください。
3. レンズケースは長期間使用していると汚れ等の蓄積により雑菌などの繁殖を招くことがあります。レンズケースは定期的に、必ず新しいものと交換してください。
4. 本剤は洗浄剤で、消毒剤ではありません。ソフトコンタクトレンズの場合、別途ソフトコンタクトレンズ用消毒剤を使用してください。

●主成分

タンパク分解酵素、脂肪分解酵素、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤

◎本剤に関するお問い合わせ

オフテクスお客様相談室

0120-021094

受付：月～金（祝日は除く）9:00～17:00

UD FONT

この説明書は、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



株式会社 オフテクス

神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp