

すべてのソフトコンタクトレンズに使用できます この説明書は大切に保管してください

- ご使用前に必ず本剤および組み合わせて使用する製品(MPS)の使用説明書をよく読み、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
- 使用説明書に記載された使用方法や注意事項を必ず守ってください。
- ご使用中のコンタクトレンズの取り扱いについてはレンズの取扱説明書をよく読み、使用方法等を守ってください。

クレンスターは、ソフト用1本タイプ(MPS)に、毎日レンズ1枚につき1滴加えて使用することにより、消毒と同時にタンパク除去を行う液体タンパク除去剤です。

ソフトコンタクトレンズは装用期間の経過とともに、タンパク質等がレンズ表面に付着して、白濁や変色が生じたり、装用感が悪くなったりすることがあります。このため、ソフト用1本タイプ(MPS)による毎日の消毒・洗浄に加え、毎日クレンスターによるタンパク除去を行うことをおすすめします。

※ソフト用1本タイプ(MPS):「バイオクレン®ワン」「ロートCキューブ®ソフトワン」「オプティ・フリー®プラス」等

～ 眼障害を起こさないために ～

正しいレンズケアを行わないと、眼障害につながるおそれがあります。眼障害を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



- 使用後のレンズケースは、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。



- 眼科医等の専門家に、正しいケア方法の指導を受けましょう。



- レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。



- レンズケースは定期的に、必ず新しいものと交換してください。



- 目の健康を守るため、3か月に1度は定期検査を受けましょう。

使用方法


レンズケア前




レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。




レンズケースの左右に本剤を1滴ずつ入れ、ソフト用1本タイプ(MPS)を満たしてください。
※容器底部をプッシュして滴下してください。

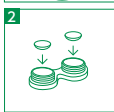

ソフト用1本タイプ(MPS)で、レンズのこすり洗いとすすぎを用法通り行い、ケースにレンズを入れてください。

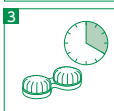

ケースのふたをしめ、4時間以上放置してください。
※衛生面から、12時間以上同じ混合液にレンズをつけないでください。

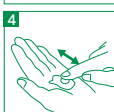

レンズを取り出し、ソフト用1本タイプ(MPS)で十分すすいでから装用してください。

- 使用後のレンズケースは、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。



△クレンスターの取り扱い

容器底部のプッシュボタンを指の腹で押してください。
強く押したり爪を立てると変形する場合があります。

長期保存(12時間以上)する場合

上記の使用方法③の後に、ケース内の混合液を捨て、レンズとケースをソフト用1本タイプ(MPS)ですすいだ後、新たに同剤(MPS)をケースに満たして保存してください。保存期間については、組み合わせて使用する製品の使用説明書をよくお読みください。

▲ 使用上の注意

守らなければならないこと

- 1.この使用説明書に記載している使用方法を厳守してください。使用方法を誤るとケアが不完全となり、眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- 2.コンタクトレンズを取り扱う前には、必ず石けなどで手をきれいに洗ってください。
- 3.使用後のレンズケースは空にして、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。清潔なレンズケースを使用しないと雑菌が繁殖し、眼障害の原因となることもあります。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

してはいけないこと

- 1.容器の先端を、ソフトコンタクトレンズや指などで触れないでください。雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがあります。また混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- 2.本剤を点眼しないでください。誤って目に入った場合は、すぐに多量の水で目を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- 3.本剤を飲まないでください。誤って飲んだ場合は、多量の水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- 4.一度使用した薬液は再使用や継ぎ足しをせず、毎回新しい薬液を使用してください。
- 5.使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 6.本剤は煮沸消毒・過酸化水素消毒・ヨウ素消毒システムとの併用はできません。必ずソフト用1本タイプ(MPS)と組み合わせて使用してください。

相談すること

- 1.次の人は使用前に眼科医に相談してください。
 - 今までに目のアレルギー症状(たとえば目の充血、かゆみ、はれ、発疹・発赤等)を起こしたことがある人。
 - 眼科医の治療を受けている人。
- 2.本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、痛み、充血、流涙、目やに、ごろごろ感(または異物感)、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにソフトコンタクトレンズをはずし、眼科医に相談してください。そのまま装用し続けると、眼障害につながる場合があります。
- 3.本剤を使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意してください。

保管および取り扱い上の注意

- 1.小児の手の届かない所に保管してください。
- 2.使用後はキャップをしっかりとめて、直射日光を避け、室温保管してください。
- 3.誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 4.レンズケースは長期間使用していると汚れ等の蓄積により雑菌などの繁殖を招くことがあります。レンズケースは定期的に、必ず新しいものと交換してください。
- 5.容器を開封したら、すみやかに使用してください。まれに酵素の性質により色が黄色になることがあります。品質には問題ありません。

問題があった場合の対処法

組み合わせる使用する製品の使用説明書に
記載の対処法に従ってください。

- 1.本剤で処理したレンズを装用中、目に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、眼科医の診察を受けてください。
- 2.誤って目に入った場合は、すぐに多量の水で目を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- 3.誤って飲んでしまった場合は、多量の水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- 4.本剤が衣服や皮膚についた場合は水道水で洗い流してください。

●主成分：タンパク分解酵素

◎本剤およびコンタクトレンズケアに関するお問い合わせ

オフテクスお客様相談室

0120-021094

受付：月～金(祝日は除く)9:00～17:00



株式会社 オフテクス

神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp