

⚠ 使用上の注意

相談すること

1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状がある人
・はげしい目の痛み

2 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。


使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 【用法・用量】 1.コンタクトレンズの両面を本剤2～3滴で濡らします。
2.そのままレンズを眼に装着します。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を、まぶた、まつ毛、コンタクトレンズ、指に触れさせないでください。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開封してください。
(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- (5) 混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- (6) コンタクトレンズの装着のみに使用し、飲まないでください。

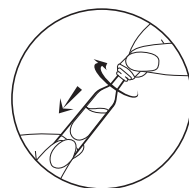

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所(1～30℃)で保管してください。冷蔵庫で保管する場合、凍らせないように注意してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 薬液を他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わる恐れがあります。)
- (4) 1本を他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- (6) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろのポケット等に入れしないでください。
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)