

BIOCLIN® L

バイオクレン エル

Ophtecs

O₂・ハードコンタクトレンズ用
液体酵素洗浄剤・洗浄保存液

すべてのO₂・ハードコンタクトレンズに使用できます

この説明書は大切に保管してください

- ご使用前に必ずこの使用説明書をよく読み、必要な時に読めるよう大切に保管してください。
- 使用説明書に記載された使用方法や注意事項を必ず守ってください。使用方法を誤ると、眼障害の原因となり、重篤な場合は失明してしまうこともあります。
- ご使用中のハードコンタクトレンズの取り扱いについてはレンズの取扱説明書をよく読み、使用方法等を守ってください。

ハードコンタクトレンズには、涙液中のタンパク質や老廃物などの汚れが付着します。これらの汚れをそのままにしておくと、装用感が悪くなるばかりでなく、細菌やカビの繁殖にもつながり、眼障害を起こす場合があります。このようなことを防ぐため、ハードコンタクトレンズのケアを正しく行うことが必要です。
バイオクレン エルは、バイオクレン エルⅠ（液体酵素洗浄剤）とバイオクレン エルⅡ（洗浄保存液）を組み合わせることで使用することにより、洗浄・タンパク除去・保存を同時に行う、O₂・ハードコンタクトレンズ用ケア用品です。

～ 眼障害を起こさないために ～

正しいレンズケアを行わないと、眼障害につながるおそれがあります。眼障害を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



- 使用後のレンズケースは、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。



- 眼科医等の専門家に、正しいケア方法の指導を受けましょう。



- レンズケースは6ヵ月以内を目安に、必ず新しいものと交換してください。



- レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。




- 目の健康を守るため、3ヵ月に1度は定期検査を受けましょう。

使用方法

レンズケア前




- レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。
- 必ずエルⅠとエルⅡを組み合わせ使用してください。

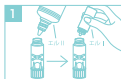

レンズケースにレンズをセットし、エルⅡを9分目まで入れ、エルⅠをレンズ1枚につき1～2滴入れてください。

※レンズの汚れがひどい場合は、エルⅠをレンズ1枚につき3～5滴入れてください。

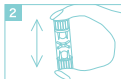

ふたをしめ、レンズケースを軽く振って、そのまま1時間以上放置してください。



レンズケースからレンズを取り出し、水道水で十分すすいでから装用してください。

※レンズを水道水ですぐ前に、レンズにエルⅡを2～3滴落とし、指で軽くすり合わせていただくことによりよい装用感が得られます。



△エルⅠの取り扱い

本体底部のプッシュボタンを指の腹で押してください。
強く押ししたり爪を立てると変形する場合があります。

- 使用後のレンズケースは、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。
- レンズの汚れがひどい場合は、エルⅡを2～3滴レンズに落とし、指で軽くすり合わせ、水道水ですすいでから通常ケアを行ってください。また、タンパク・脂肪除去剤（バイオクレン アクティバタブレットMini等）や、洗浄液（バイオクレン ミクロン等）を使用するのも効果的です。

レンズの長期保存方法

ケア完了後、レンズを水道水で十分すすいでください。水道水で十分に洗ったレンズケースにレンズをセットし、エルⅡを9分目まで入れ、ふたをしめてください。レンズケースのふたを開けなければ、そのまま1ヵ月間レンズを保存できます。1ヵ月を超えて保存する場合は、1ヵ月に1回エルⅡを入れ替えてください。※常温で保存してください。

容器の先にはふれない

容器の先が指先やレンズに触れると、雑菌などにより液が汚染されるおそれがあるため、触れないように注意してください。



液のつめかえは禁止

品質を保持し、十分な効果を発揮するために、他の容器に入れかえたり、小分けにはしてはなりません。



△ 使用上の注意

守らなければならないこと

- 1.この使用説明書に記載している使用方法を厳守してください。使用方法を誤るとケアが不完全となり、眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- 2.コンタクトレンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手をきれいに洗ってください。
- 3.使用後のレンズケースは空にして、水道水でよく洗い、自然乾燥させてください。清潔なレンズケースを使用しないと雑菌が繁殖し、眼障害の原因となることもあります。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

してはいけないこと

- 1.ソフトコンタクトレンズには使用しないでください。
- 2.容器の先端を、ハードコンタクトレンズや指などで触れないでください。雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがあります。また混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- 3.本剤を点眼しないでください。誤って眼に入った場合は、すぐに多量の水道水で眼を洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- 4.本剤を飲まないでください。誤って飲んだ場合は、多量の水を飲み、直ちに医師の診察を受けてください。
- 5.一度使用した薬液は再使用や継ぎ足しをせず、毎回新しい薬液を使用してください。
- 6.使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 7.エルIの希釈には他のO₂-ハードコンタクトレンズ用保存液や精製水等は使用しないでください。
- 8.エルIは年月の経過と共に色が淡い黄色になることがあります。品質に問題はありませんが、混濁したものや変色したものは使用しないでください。

相談すること

- 1.次の人は使用前に眼科医に相談してください。
 - 今までに目のアレルギー症状(たとえば目の充血、かゆみ、はれ、発疹・発赤等)を起こしたことがある人。
 - 眼科医の治療を受けている人。
- 2.本剤を使用したハードコンタクトレンズを装用中、または装用後に、痛み、充血、流涙、目やに、ごろごろ感(または異物感)、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにハードコンタクトレンズをはずし、眼科医に相談してください。そのまま装用し続けると、眼障害につながる場合があります。
- 3.本剤を使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意してください。

●主成分

- ・パイオクレン エルI 10mL(液体酵素洗浄剤)
タンパク分解酵素、脂肪分解酵素
- ・パイオクレン エルII 360mL(洗浄保存液)
陰イオン界面活性剤

保管および取り扱い上の注意

- 1.小児の手の届かない所に保管してください。
- 2.使用後はキャップをしっかりとめて、直射日光を避け、常温保管してください。
- 3.誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 4.レンズケースは長期間使用していると汚れ等の蓄積により雑菌などの繁殖を招くことがあります。レンズケースは6ヵ月以内を目安に、必ず新しいものと交換してください。
- 5.容器を開封したら、すみやかに使用してください。
- 6.本剤が衣服や皮ふに付着した場合にはすぐに水道水でよく洗い落としてください。

◎本剤およびコンタクトレンズケアに関するお問い合わせ

オフテクスお客様相談室

 **0120-021094**

受付：月～金(祝日は除く) 9:00～17:00

UD FONT

この説明書は、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



株式会社 **オフテクス**

神戸市中央区港島南町5-2-4
www.ophtecs.co.jp